



Uputstvo za upotrebu



 **alerta**[®]
bubble 2

ALT-9001
Bubble 2 mattress



SR Verzija

Alerta Medical je svetski lider u kreiranju i proizvodnji inovativnih, najsavremenijih antidekubitalnih dušeka na tržištu zdravstvene nege, pružajući mogućnost neogovateljima da proaktivno povećaju sigurnost i udobnost pacijentima.

Princip rada

- Naizmeničnim pritiskom u određenom ritmu izbegava se dugotrajna vaskularna kompresija koja vrlo verovatno može izazvati hipoksiju tkiva.

Smernice za rukovanje

- Tradicionalno prihvaćena metoda za kontrolu nastanka dekubitusa rana je okretanje pacijenta u određenim intervalima kao i redovno posmatranje rizičnih područja.
- Antidekubitni dušek je zamišljen da upotpuni ovaj tretman, posmatranje pacijenta kao i njegovo okretanje po potrebi i dalje treba smatrati sastavnim delom tretmana.
- Uvek konsultujte fizijatra ili medicinsko osoblje pre upotrebe ovog uređaja.

Funkcije kontrolne table



- Ručica za lako podešavanje pritiska (maksimalna težina pacijenta 135kgs).
- On/Off prekidač.
- Kontakt podaci.

Instalacija/Upotreba

1. Odmotajte prostirku i postavite je na krevet tako da se vazdušne ćelije prostiru sve do kraja stopala. Prostirku postavite na postojeći dušek.
2. Pričvrstite prostirku za krevet tako što ćete podvući nastavak prostirke koji nema vazdušne ćelije pod postojeći dušek ili krevet.
3. Okačite kompresor (pumpu) na krevet koristeći kuke koje se nalaze na kompresoru.
4. Povežite dovodna creva iz prostirke sa priključkom na kompresoru (pumpi) pričvršćivanjem na odogovarajuće ulaze.
5. Vodite kabel za napajanje duž kreveta sve do utičnice i ubodite kabel u utičnicu.
6. Pritisnite prekidač ON da bi ste upalili kompresor (pumpu)
7. Pre nego što postavite pacijenta na dušek treba da sačekate da se prostirka naduva u potpunosti i to na maksimalnoj kilaži.
8. Nakon toga postavite potenciometar na kilažu koja odgovara pacijentovoj kilaži.

Izduvavanje u hitnim slučajevima

- U slučaju nužde, izvaditi creva iz kompresora i vazduh će se sam ispumpati uz pomoć težine samog pacijenta.
- Isključiti kompresor (pumpu).
- Da bi ste nastavili sa normalnom upotrebom pratite korak 4. i korak 8. Koji su opisani iznad.

Mere opreza

- **OBAVEZNO VODITE RAČUNA** kada upravljate ovim električnim uređajem.
- **NE** ostavljajte ga uključenog u struju kada ga ne koristite.
- **NE** izlažite opremu visokoj vlazi.
- **NE** koristite abrazivna sredstva kao što su industrijski odmašćivači ili sirćetni rastvarač.
- **NE** pokušavajte da promenite poziciju uređaja dok je priključen na električnu energiju.

Čišćenje/Dezinfekcija

Antidekubit dušek mora biti temeljno očišćen prilikom promene pacijenta da bi se izbegla međusobna kontaminacija.

- **OBAVEZNO** vodite računa da je uređaj isključen sa napajanja prilikom pokušaja čišćenja.
- **OBAVEZNO** vodite računa da koristite krpu natopljenu sa vodom i blagim detaržentom.
- **OBAVEZNO** vodite računa o koncentraciji rastvora koju je prepisao proizvođač.
- **OBAVEZNO** voditi računa da ne prekoračite proizvođačeve preporuke rastvora za čišćenje.
- Koristite krpu natopljenu rastvorom vode i deterdženta ili dezinfikacionim sredstvom koji ima oznaku CE i to u skladu sa preporukama proizvođača.
- Da biste osigurali potpunu dekontaminaciju koristite Alerta Medical's OTEX dekontaminacioni set.

Servis & Garancija

Ovaj uređaj se ne sme popravljati na svoju ruku. Servis, popravku i održavanje mora obavljati isključivo ovlašćeni Alerta serviser. Ako ne koristite originalne Alerta delove, poništavate garanciju ovog proizvoda.

Obučeni tehničari u Alerta se obučavaju u namenskim radionicama i vrše planirano održavanje i popravku svih modela kako antidekubitnih dušeka tako i antidekubit jastuka. Svi uređaji su dekontaminirani po Alerta odobrenom standardu prema revolucionarnom ozonsko dezinfikacionom sistemu – OTEX – koji ubrizgavanjem ozona ubija sve bakterije tipa MRSA i C.Diff tokom ciklusa pranja I validizuje ih stampanjem računa sa vrednostima. Potom se sistemi popravljaju / servisiraju u higijenski kontrolisanom okruženju, testiraju se na curenje, testiraju se ciklusi i P.A.T. testirano, pre nego što se vrati kupcu u potpuno sertifikovanom radnom stanju.

Karakteristike prostirke

Specifikacije:

Maksimalna težina pacijenta: 135Kgs.

Dimenzije prostirke: 200x90x7cm.

Materijali: Medicinski PVC

Karakteristike kompresora

Specifikacije:

Ciklus: 6 mins

Izlaz vazduha: 5L/min

Opseg pritiska: 45 - 110mmHg

Napajanje električne energije:

220 - 240V 50 - 60Hz

Protection Against Class II

Garancija na električne udare: 12 meseci

Činimo vrhunsku medicinsku opremu pristupačnom

Sedište :

Alerta Medical

4 Symington Place
Riverside Business Park
Irvine, KA11 5DE, UK

